

7001F (Smarty) Elektrisk Kørestol Brugermanual

CE

FDA



Symboler brugt i denne guide	3
Bortskaffelse og genbrug af batterier skal ske korrekt.	3
Vigtig Information	4
Sikkerhed	6
Vigtig Bemærkning	6
Vær Opmærksom Før Brug	7
Kørsel på Fortove eller Cykelstier	7
Brugstræning	7
Sikkerhedstips	7
Vejrforhold og Miljø	8
Opbevaring	8
Vær Opmærksom Efter Brug	8
Batteribrug	9
Hjælpeladning	9
Normal Opladning af Batteriet	9
Vigtige Bemærkninger	9
Specifikationer	10
Manglende Overholdelse af Instruktioner	10
Før Brug	10
Kørselsøvelse	11
Opmærksomhed	11
Advarsel	11
Elektromagnetisk Kompatibilitet	12
Tabel 201: Vejledning og Producentens Erklæring – Elektromagnetisk Emission	12
Tabel 202: Vejledning og Producentens Erklæring – Elektromagnetisk Immunitet	13
Tabel 204: Vejledning og Producentens Erklæring – Elektromagnetisk Immunitet	15
Tabel 206: Anbefalet Separationsafstand mellem Bærbart og Mobilt RF-Kommunikationsudstyr og Den Elektriske Kørestol	16
Forholdsregler mod Elektromagnetisk Interferens	18

Sluk Straks for Kørestolen, hvis Følgende Opstår	18
Sikkerhedsinstruktioner	18
Påmindelse	19
Terminologi	19
Advarsel	20
Betjeningsvejledning til Joystick-Controller	20
Samling af Controlleren	20
Betjening af Controlleren	20
Driftsmiljø	20
Rengøring	20
Tænd/Sluk-Knap og Strømdisplay	20
Tænd for Strømmen	21
Sluk for Strømmen	21
Vigtig Information om Batteriet	21
Opladerbrug	21
Opmærksomhed Ved Opladning	21
Vedligeholdelse	22
Fjernbetjening	22
Bemærk	22
Kontaktinformation	23
CE mærket	23

Symboler brugt i denne guide



Advarselstegn eller indikator for farlig handling, som kan bringe din eller andres sikkerhed i fare.



Brug ikke mobiltelefoner, walkie-talkies, elektroniske enheder eller andre radiosendere, mens du betjener enheden.



Opbevar enheden et rent og tørt sted, væk fra regn, sne, is, salt og vand.



Batteriet indeholder ætsende stoffer.



Risiko for eksplosion.



brug ikke batterier med forskellige kapaciteter (Ah), og bland ikke gamle og nye batterier. Udskift altid begge batterier samtidig.



Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteripolerne. Kontakt kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød og føre til skade.



Brandfarligt materiale – undgå at udsætte enheden for varmekilder som åben ild eller gnister. Transportér ikke batterier sammen med brandbare eller antændelige genstande.



Bortskaffelse og genbrug af batterier skal ske korrekt.

Vigtig Information

Læs alle instruktioner, advarsler og noter i denne manual, før du forsøger at betjene din elektriske kørestol for første gang. Hvis der er noget i denne manual, du ikke forstår, eller hvis du har brug for yderligere assistance til samling eller betjening, bedes du kontakte din autoriserede lokale leverandør.

Din sikre brug af produktet afhænger af, om du følger instruktionerne, forsigtighedsreglerne og advarslerne i denne manual. Vi er ikke ansvarlige for skader og/eller personskader som følge af betjening eller manglende overholdelse af instruktioner, forsigtighedsregler og advarsler i denne manual.



1. Fodstøtte
2. Batteri
3. Opladningsport
4. Forhjul
5. Armlæn
6. Skubbehåndtag
7. Baghjul
8. Joystick
9. Ryglæn
10. Sammenfoldningsmotor



1. Motorbremsens frigivelseshåndtag
2. Motor
3. Anti-tip hjul



1. Sådan ser controllerknapperne ud.
2. Der er to knapper til udfoldning (Rt) og sammenfoldning (Lt) af kørestolen.
3. Tag kørestolen og reservedelene ud af emballagen.
4. Installer controlleren på højre eller venstre armlæn til føreren.
5. Tænd for joysticket, klik på udfoldningsknappen, indtil indikatorlyset blinker og er i midten af indikatoren.
6. Klik derefter én gang på hornet, så åbner kørestolen automatisk.

Sikkerhed

Læs venligst brugermanualen omhyggeligt og følg kravene under brug af 7001F (Smarty). Brug ikke kørestolen, før føreren har læst manualen grundigt og kender dens funktioner. Lån den ikke ud til personer, der ikke kan betjene 7001F (Smarty).

Vigtig Bemærkning

Du har brug for megen øvelse for at mestre færdighederne, før du sikkert kan køre 7001F (Smarty). Hvis du ikke er øvet eller ikke følger brugervejledningen til dette produkt, kan det medføre skader på føreren eller andre samt materielle tab. Vores virksomhed påtager sig kun ansvaret for produktfejl eller skader og er IKKE ansvarlig for personskader eller materielle tab relateret til brugen af produkterne.

Vær Opmærksom Før Brug

- Bliv fortrolig med de lokale trafikregler.
- 7001F (Smarty) tilhører kategorien ikke-motoriserede køretøjer, designet specielt til ældre og personer med mobilitetsproblemer. Intet kørekort er påkrævet ifølge færdselsloven, men føreren af 7001F (Smarty) skal overholde de samme trafikregler som fodgængere.

Kørsel på Fortove eller Cykelstier

- **A.** Bliv fortrolig med alle trafiksignaler og markeringer, der bruges for fodgængere.
- **B.** Undgå pludselige retningsændringer eller at krydse vejen pludseligt, når du kører.

Brugstræning

- Før du betjener 7001F (Smarty) for første gang, skal du blive fortrolig med alle køretøjets funktioner.
- Øv dig i at køre fremad, øge hastighed, reducere hastighed, stoppe, bakke, køre op og ned ad bakke samt dreje i et sikkert område med få mennesker og god vejtilstand.
- Når du er fortrolig med disse operationer, kan du køre på vejen.

Sikkerhedstips

- Kør ikke 7001F (Smarty) efter indtagelse af alkohol, hvis du er udmattet eller ikke er fuldt bevidst.
- Sørg for, at føreren ikke lider af mentale sygdomme eller andre sygdomme, der kan påvirke sikker kørsel.
- Hvis du tager medicin, skal du konsultere din læge om eventuelle påvirkninger på din evne til at betjene den elektriske kørestol.

- Kontroller køretøjets tilstand for at sikre, at bremserne fungerer korrekt, sædet er låst, og batteriniveauet er tilstrækkeligt.
-

Vejrforhold og Miljø



- Udsæt aldrig køretøjets elektriske system for fugt (regn, sne eller tåge).
- Vask ikke køretøjet med vand, da det kan beskadige det elektriske system.
- Hvis 7001F (Smarty) bliver våd, skal den tørres og kontrolleres, før den bruges igen.
- Kør ikke 7001F (Smarty) under ugunstige vejrforhold såsom regn, sne, tåge eller kraftig vind.
- Kør ikke 7001F (Smarty) på ørken, strand, mudrede veje, veje med vandpytter, isglatte veje, meget glatte overflader eller salte og alkaliske områder.

Opbevaring

- Elektriske kørestole skal opbevares indendørs natten over for at sikre optimal funktion og levetid. Udsættelse for fugt, kulde og andre vejrforhold kan skade de elektriske komponenter og batterier, hvilket kan føre til driftsfejl eller reduceret ydeevne. Ved at opbevare kørestolene indendørs beskytter vi dem mod disse påvirkninger og sikrer sikkerhed og pålidelighed for brugerne.
-

Vær Opmærksom Efter Brug

1. Hvis du ikke skal bruge 7001F (Smarty) i over 48 timer, skal du slukke for strømafbryderen.
2. Når du transporterer 7001F (Smarty) i andre køretøjer, skal du sikre, at batteriet er fastgjort.

Batteribrug



Hjælpeladning

- Det anbefales at oplade batteriet før brug ved at tilslutte opladeren til batteriets opladningsport og en 240V strømkilde, indtil batteriet er fuldt opladet.

Normal Opladning af Batteriet

- Batteriet skal oplades umiddelbart efter brug.
- Sluk for strømmen, når kørestolen ikke er i brug.

Vigtige Bemærkninger

- Stikkene på batterikassen skal fastgøres korrekt (batterikassens ledninger er forbundet korrekt fra fabrikken).
- Løse eller forkerte forbindelser kan medføre funktionsfejl og alvorlige skader.
- Lithiumbatterier må ikke være i nærheden af åben ild eller varmekilder, må ikke smides i vand og må ikke udsættes for direkte sollys ved høje temperaturer.
- Batteriet må ikke adskilles, da dets indre dele er forsegledede.
- Brugte lithiumbatterier skal genanvendes af virksomheden, forhandleren eller på de af myndighederne anviste steder.
- Smid ikke brugte batterier i skraldespanden for at undgå miljøforurening.

Specifikationer

- **Modelnavn:** YH—7001F (Smarty) AUTO Folding
 - **Samlede produktstørrelse (udfoldet):** 1100 × 630 × 960 mm
 - **Nettovægt (med batteri):** 28,6 kg
 - **Forhjul:** 200 mm × 50 mm
 - **Baghjul:** 320 mm × 60 mm
 - **Maksimal belastning:** 150 kg
 - **Fremadgående hastighed:** 0-6 km/t (justerbar)
 - **Rækkevidde pr. opladning:** 15-20 km
 - **Motor:** 24V/250W × 2
 - **Drejeradius:** 600 mm
 - **Batteri (Lithium):** 24V/20AH
 - **Bremse:** Intelligent elektromagnetisk bremse
 - **Anti-tip hjul:** 50 mm × 25 mm
 - **Klatreevne:** ≤13°
 - **Oplader:** AC100-240V 50/60Hz
 - **Output:** 24V 3A / 24V 2A / 24V 1,5A
-

Manglende Overholdelse af Instruktioner

Manglende overholdelse af nedenstående instruktioner kan resultere i skade på den elektriske kørestol eller personskade.

Før Brug

- Find et åbent område, og få en assistent til at hjælpe dig med at øve, indtil du kan betjene kørestolen sikkert.

- Sørg for, at strømmen er slukket, før du sætter dig eller rejser dig fra sædet.
- Indstil hastighedskontrollen til en passende hastighed baseret på dine behov.
- Vi anbefaler, at du holder hastigheden på det laveste niveau, indtil du er fortrolig med kørestolens køreegenskaber.

Kørselsøvelse

- Skub joysticket i den ønskede retning (fremad, bagud, venstre, højre) for at bevæge kørestolen.
 - Start med at øve kørsel fremad med laveste hastighed.
 - Når du er fortrolig med at køre fremad, øv dig i at lave "S"-sving.
 - Øv derefter at bakke, og vær opmærksom på hastighedskontrollen under bakning.
-

Opmærksomhed

1. Købere eller brugere af elektriske kørestole bør bruge dem i det elektromagnetiske miljø specificeret i tabellerne 201, 202, 204 og 206, ellers kan kørestolen muligvis ikke fungere korrekt.
2. Bærbart og mobilt radioudstyr kan påvirke den normale brug af elektriske kørestole. Brug venligst kørestolen i det anbefalede elektromagnetiske miljø.

Advarsel

1. Ud over det tilbehør og de kabler, der leveres af producenten af den elektriske kørestol, kan brugen af andet tilbehør og kabler resultere i øget emission eller nedsat immunitet.
2. Elektriske kørestole bør ikke være tæt på eller stables med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at være tæt på eller stablet, skal man sikre, at den fungerer korrekt ved hjælp af den konfigurerede opsætning.

Elektromagnetisk Kompatibilitet

Tabel 201: Vejledning og Producentens Erklæring – Elektromagnetisk Emission

Den elektriske kørestol er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Køberen eller brugeren skal sikre, at den bruges i dette elektromagnetiske miljø.

Emissionstest	Overensstemmelse	Elektromagnetisk miljø – Vejledning
Radiofrekvens-emissioner (GB 4824)	Gruppe 1	Den elektriske kørestol bruger kun radiofrekvensenergi til sine interne funktioner. Derfor er dens RF-emissioner lave og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i nærliggende elektronisk udstyr.
Radiofrekvens-emissioner (GB 4824)	Klasse B	Den elektriske kørestol er egnet til brug i alle faciliteter, inklusive hjemmemiljøer, og kan tilsluttes direkte til

det offentlige
lavspændingsnetværk.

Harmoniske emissioner (GB 17625.1) Ikke relevant

Spændingsfluktuationer/Flimmeremissioner (GB 17625.2) Ikke relevant

Tabel 202: Vejledning og Producentens Erklæring – Elektromagnetisk Immunitet

Den elektriske kørestol er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Køberen eller brugeren skal sikre, at den bruges i dette elektromagnetiske miljø.

Immunitetstest	IEC 60601 Testniveau	Overensstemmelses niveau	Elektromagnetisk miljø – Vejledning
Elektrostatiske afladninger (ESD) (GB/T 17626.2)	±6 kV kontaktudladning ±8 kV luftudladning	±6 kV kontaktudladning ±8 kV luftudladning	Gulve skal være træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulve er belagt med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %.

Elektriske hurtige transienter/burst (GB/T 17626.4)	±2 kV for strømkabler ±1 kV for ind-/udgange	Ikke relevant	Strømforsyningen skal have den kvalitet, der bruges i typiske kommercielle eller hospitalsmiljøer.
Overspænding (GB/T 17626.5)	±1 kV linje til linje ±2 kV linje til jord	Ikke relevant	Strømforsyningen skal have den kvalitet, der bruges i typiske kommercielle eller hospitalsmiljøer.
Spændingsdyk, korte afbrydelser og variationer i forsyningsspænding (GB/T 17626.11)	<5 % UT i 0,5 cyklusser 40 % UT i 5 cyklusser 70 % UT i 25 cyklusser <5 % UT i 5 sekunder	Ikke relevant	Strømforsyningen skal have den kvalitet, der bruges i typiske kommercielle eller hospitalsmiljøer. Hvis brugeren har brug for kontinuerlig drift under strømafbrydelser, anbefales det at bruge en UPS eller batteri.

Magnetiske felter ved netfrekvens (50/60 Hz) (GB/T 17626.8)	3 A/m	3 A/m	Magnetfeltet ved netfrekvensen skal være på niveau med typiske kommercielle eller hospitalsmiljøer.
--	-------	-------	--

Bemærk: UT er AC-forsyningsspændingen før testniveauet anvendes.

Tabel 204: Vejledning og Producentens Erklæring – Elektromagnetisk Immunitet

Den elektriske kørestol er beregnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Køberen eller brugeren skal sikre, at den bruges i dette elektromagnetiske miljø.

Immunitetstest	IEC 60601 Testniveau	Overensstemmels esniveau	Elektromagnetisk miljø – Vejledning
Radiofrekvens- ledning (GB/T 17626.6)	3 V (effektiv værdi) 150 kHz til 80 MHz	Ikke relevant	Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudst yr bør ikke bruges tættere på nogen del af den elektriske kørestol end den anbefalede separationsafstand beregnet ud fra senderens frekvens.

Radiofrekvens- stråling (GB/T 17626.3)	3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz	3 V/m	Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr
--	--------------------------------	-------	--

Anbefalet separationsafstand:

- **$d = 1,2 \sqrt{P}$** for 80 MHz til 800 MHz
- **$d = 2,3 \sqrt{P}$** for 800 MHz til 2,5 GHz

Hvor **P** er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til producenten, og **d** er den anbefalede separationsafstand i meter (m).

Bemærk 1: Ved 80 MHz og 800 MHz anvendes den højere frekvens.

Bemærk 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Tabel 206: Anbefalet Separationsafstand mellem Bærbart og Mobilt RF-Kommunikationsudstyr og Den Elektriske Kørestol

Den elektriske kørestol er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor RF-stråling er kontrolleret. Brugeren kan bidrage til at undgå elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og den elektriske kørestol som anbefalet nedenfor, i overensstemmelse med senderens maksimale nominelle udgangseffekt.

**Maks. Nominel Udgangseffekt for
Senderen (W)**

Separationsafstand (m)

80 MHz til 800 MHz

$(d = 1,2 \sqrt{P})$

0,01

0,12 m

0,1

0,38 m

1

1,2 m

10

3,8 m

100

12 m

For sendere med en maksimal nominel udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand **d** i meter (m) bestemmes ved hjælp af den ligning, der hører til frekvensen af senderen, hvor **P** er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W).

Bemærk 1: Ved 80 MHz og 800 MHz anvendes den højere frekvens.

Bemærk 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Forholdsregler mod Elektromagnetisk Interferens

Følg nedenstående instruktioner for at reducere risikoen for ukontrolleret bremsefunktion eller alvorlig skade på kørestolen:

1. Tænd ikke håndholdte personlige kommunikationsenheder som CB-radioer og mobiltelefoner, mens kørestolen er tændt.
2. Vær opmærksom på nærliggende sendere såsom radio- eller tv-stationer, og undgå at komme tæt på dem.
3. Hvis der opstår utilsigtet bevægelse eller bremsefrigørelse, sluk straks for kørestolen for at sikre sikkerheden.
4. Vær opmærksom på, at tilføjelse af tilbehør eller komponenter eller ændring af kørestolen kan gøre den mere modtagelig for interferens fra radiosendere.
5. Rapportér alle hændelser med utilsigtet bevægelse eller bremsefrigørelse til kørestolens sælger, og undersøg, om der er radiosendere i nærheden.

Sluk Straks for Kørestolen, hvis Følgende Opstår

- **Pludselige bevægelser.**
 - **Ukontrolleret retningsstyring.**
 - **Bremsefejl.**
-

Sikkerhedsinstruktioner



- Kontrollér alle skruer for stramhed hver tredje måned.
- Transporter ikke passagerer.
- Kør ikke tværs over skrån timer.
- Kør ikke i påvirket tilstand.
- Træk ikke efter andre køretøjer.
- Brug ikke håndholdte kommunikationsenheder under kørsel.
- Læs denne manual, før du betjener kørestolen.

- Overskrid ikke den maksimale stigningsvinkel.
- Brug ikke joysticket ukontrolleret på skråninger.
- Overskrid ikke den maksimale brugervægt.
- Sluk ikke for controlleren under kørsel.
- Kør ikke på blødt eller ujævnt terræn.
- Forsøg ikke at bestige trapper over 50 mm uden rampe.
- Demonter ikke kørestolen uden at slukke for strømmen.
- Betjen ikke kørestolen uden en fører.
- Kør kun på fortove, ikke på kørebanen.
- Brug lav hastighed ned ad bakker.
- Brug altid sikkerhedsbæltet.
- Hold fødderne på fodstøtten under kørsel.
- Sørg for fuldt opladede batterier før tur.
- Oplad kørestolen i et godt ventileret område.

Påmindelse

Som fører af en elektrisk kørestol skal du følge alle gældende regler og love.

Terminologi

- **Joystick:** Enhed til styring af kørestolens bevægelser.
 - **Controller:** Enhed, der styrer joysticket og kørestolens funktioner.
 - **Armlæn:** Hvor armene hviler under brug.
 - **Fodstøtte:** Hvor fødderne hviler under brug.
 - **Anti-tip hjul:** Hjul, der forhindrer kørestolen i at tippe.
 - **Drivhjul:** Hovedhjulene, der driver kørestolen fremad.
 - **Svinghjul:** Forhjulene, der hjælper med at styre kørestolen.
-

Advarsel

- Demontering af motoren kan forringe køretøjets ydeevne og forårsage skade.
-

Betjeningsvejledning til Joystick-Controller

Samling af Controlleren

1. Installér controlleren på forbindelsesarmen.
2. Juster forbindelsesrøret til passende længde, og stram møtrikken.
3. Tilslut stikkene til venstre og højre motor samt batteriet.

Betjening af Controlleren

- Undgå at støde controlleren, især joysticket.
- Slå ikke på controlleren eller joysticket under kørsel.
- Sørg for, at kontrolsystemet er sikkert og pålideligt.

Driftsmiljø

- Opbevar ikke kontrolsystemet i fugtige omgivelser i længere tid.
- Hvis kontrolsystemet kommer i kontakt med mad eller drikke, skal det rengøres straks.

Rengøring

- Brug en klud fugtet med mildt rengøringsmiddel til at tørre kontrolsystemet og joysticket af.
- Brug ikke slibemidler eller aggressive rengøringsmidler.

Tænd/Sluk-Knap og Strømdisplay

- Tænd/sluk-knappen aktiverer kørestolens elektroniske systemer.
- I nødstilfælde kan du bruge knappen til at stoppe kørestolen.
- Strømdisplayet viser batteriets aktuelle niveau og kørestolens status.

Tænd for Strømmen

- Tryk på tænd/sluk-knappen. Alle indikatorer vil lyse, og batteriniveauet vises.

Sluk for Strømmen

- Tryk på tænd/sluk-knappen igen. Indikatorlyset slukkes.
-

Vigtig Information om Batteriet

- Hyppig opladning sikrer pålidelig ydeevne og længere levetid.
 - Hold batteriet fuldt opladet, og undgå at lade det aflade helt.
 - Hvis kørestolen ikke bruges ofte, skal batteriet oplades mindst en gang om ugen.
 - Ved forsendelse skal du kontakte transportfirmaet for at opfylde særlige krav.
 - Vedligeholdelsesfri lithiumbatterier er sikre og miljøvenlige.
 - Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til lokale forskrifter.
-

Opladerbrug

1. Kontrollér, at opladerens indgangsspænding (AC100-240V) matcher netspændingen.
2. Når opladning er nødvendig, tilslut først batteriet til opladeren og derefter opladeren til strømkilden. Ladeindikatoren lyser rødt under opladning og bliver grøn, når fuldt opladet.

Opmærksomhed Ved Opladning



- Brug ikke kørestolen, før den er fuldt opladet.
 - Brug kun den medfølgende oplader og batteri.
 - Demonter ikke opladeren, da den indeholder højspændingskredsløb.
 - Undgå væske eller metalgenstande i opladeren, og pas på stød og fald under brug og opbevaring.
 - Placer ikke genstande oven på opladeren under opladning.
 - Oplad batteriet fuldt og sluk kørestolen før opbevaring. Oplad mindst hver tredje måned.
-

Vedligeholdelse

- **Joystick/Controller:** Hold controlleren væk fra fugt, da det kan beskadige den
 - **Batterikabler:** Kontrollér, at batterikablerne ikke er korroderede.
 - **Rengøring af Kørestolen:** Rengør kørestolen med en fugtig klud. Brug ikke vand til at vaske kørestolen.
-

Fjernbetjening

1. **Udpakning:** Tag kørestolen og tilbehøret ud af emballagen.
2. **Installation:** Installer fjernbetjeningen på højre eller venstre armlæn efter behov.
3. **Tænd:** Tænd for kørestolen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen.
4. **Funktioner:** Brug fjernbetjeningen til at folde eller udfolde kørestolen automatisk.

Bemærk

- Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, før du bruger fjernbetjeningen.
 - Hold fjernbetjeningen væk fra vand og fugt.
-

Kontaktinformation

Vi håber, at denne manual hjælper dig med at få mest muligt ud af din 7001F (Smarty) elektriske kørestol. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere assistance, er du velkommen til at kontakte din autoriserede lokale leverandør.

CE mærket

**ELEKTRISK KØRESTOLE,
MEDICINSK KLASSE 1**

MODEL: 7001F



Ningbo Youhuan Automation Technology
Co., Ltd
No. 135, Xujia, Gujia Village, Jiangshan
Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang,
CN
SRN: CN-MF-000017295



SUNGO Europe B.V
Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA,
Capelle Aan Den IJssel
NL-AR-000000247

