

POWER WHEELCHAIR

HELIUM

OWNER'S MANUAL

POWER WHEELCHAIR 6101



INDHOLD

1. INDLEDNING.....	2
2. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUG.....	3-14
3. YDELSE OG STRUKTUR.....	15
4. TEKNISK FUNKTION.....	16-17
5.SAMLING, FOLKNING OG JUSTERING.....	18-20
6. BRUG OG BETJENING.....	21-26
7. FEJLANALYSE OG FEJLFINDING.....	26-27
8. SIKKERHEDSBESKYTTELSESENHED OG HÅNDTERING AF ULYKKER...	27
9. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION.....	27-29
10.TRANSPORT OG OPBEVARING.....	29
11. GENEREL VEJLEDNING.....	29-30
12.ÅBNING OG KONTROL.....	30
13. ETIKETTER, EMBALLAGELOGODESIGN.....	30-31

1. INTRODUKTION

Læs og følg alle instruktioner, advarsler og bemærkninger i denne vejledning, før du betjener din el-kørestol for første gang. Hvis der er oplysninger, du ikke forstår, eller hvis du har brug for yderligere hjælp til montering eller brug, bedes du kontakte din autoriserede lokale forhandler.

Din sikkerhed afhænger af, hvor nøje du følger advarslerne, sikkerhedsanbefalingerne og betjeningsinstruktionerne i denne manual. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader eller personskader, der opstår som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.

I denne vejledning bruges følgende symboler til at fremhæve vigtige sikkerhedsoplysninger. Det er afgørende, at du læser og forstår dem grundigt, da de bidrager til din sikkerhed og korrekt brug af el-kørestolen.

1.1 Produktintroduktion

Dette produkt kombinerer avanceret teknologi med et moderne design. Den særlige hurtige demonterings- og monteringsstruktur gør det nemt at opbevare eller transportere el-kørestolen, f.eks. i bilens bagagerum, når du rejser. Vi er overbeviste om, at produktets funktionelle design, fremragende ydeevne og problemfri betjening vil gøre din dagligdag mere bekvem og komfortabel.

1.2 Anvendelsesområde

Denne el-kørestol er designet til personer med nedsat mobilitet og har en maksimal brugervægt på **136 kg**.

1.3 Tilsigtet brug

Denne enhed er beregnet til brug af handicappede eller ældre personer med en vægt på højst **136 kg**. Den er kun beregnet til **én persons brug**.

1.4 Betjening

El-kørestolen kan betjenes enten af brugeren selv eller af en ledsager/plejepersonale.

1.5 Målgruppe

Produktet er velegnet til handicappede eller ældre personer med en vægt på højst **136 kg**.

1.6 Drift- og opbevaringsmiljø

- **Omgivelsestemperatur:** -20°C til 50°C
- **Relativ luftfugtighed:** 15% - 90%
- **Atmosfærisk tryk:** 70 kPa - 106 kPa

2. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUG

Forbedret tekst:

2.1 Udløbsdato

Denne el-kørestol er et energieffektivt og genanvendeligt produkt. Dens sikkerhed og levetid afhænger ikke kun af dens strukturelle styrke, men også af faktorer som brugerens anvendelse, det miljø den bruges i, brugerens vaner samt om regelmæssig vedligeholdelse følges. Det anbefales at overholde de angivne vedligeholdelsesrutiner for at sikre lang levetid og sikker drift.

2.2 Instruktioner før brug

2.2.1 Læs manualen før brug

Hvis du ikke har læst og fuldt ud forstået denne brugermanual, må du **ikke** bruge kørestolen.

2.2.2 Maksimal belastning og passagerer

Den maksimale vægtkapacitet er angivet i den tekniske specifikationstabel.

Overskrid ikke den maksimale vægtgrænse, og brug aldrig kørestolen til mere end én person ad gangen.

2.2.3 Undgå brug under påvirkning af alkohol eller træthed

Betjen **ikke** kørestolen, hvis du er beruset eller meget træt, da dette kan øge risikoen for ulykker.

2.2.4 Begrænset brug ved dårlig sigtbarhed

Kør **ikke** kørestolen om natten eller i andre situationer, hvor sigtbarheden er dårlig, da dette kan øge risikoen for ulykker.

2.2.5 Synshandicappede brugere

Personer med synshandicap må **ikke** køre kørestolen alene, da dette kan føre til alvorlige ulykker. En ledsager bør assistere brugeren.

2.2.6 Kontrol før første brug

Før du bruger kørestolen for første gang, anbefales det at gennemgå sektionerne "Justering" og "Øv før betjening" i denne manual for at sikre korrekt håndtering.

2.2.7 Vandresistens

Kørestolen er **ikke** fuldt vandtæt og bør **ikke** udsættes for regn eller sne. Undgå at køre den i vådt vejr eller gennem våde områder.

2.2.8 Vandtæthedsklassificering

El-kørestolen har en **IPX4-vandtæthedsklassificering**, hvilket betyder, at den kan modstå mindre vandstænk fra alle retninger, men den bør **ikke udsættes for kraftig regn eller vandpytter**.

2.3 Sikkerhedsanvisninger ved brug

2.3.1 Anbefalede vejforhold

El-kørestolen er designet til brug på **jævne og stabile overflader**. Undgå at køre på:

- Mudrede, ujævne eller bløde underlag
- Smalle eller stejle veje
- Glatte veje dækket af is eller sne
- Områder uden autoværn eller tæt ved vand

2.3.2 Passage af forhindringer

Hvis du skal passere en forhindring eller en mindre forhøjning, **sænk hastigheden og kør forsigtigt fremad** for at undgå at miste balancen. Du må ikke køre over kantsten eller andre større forhøjninger da du kan tilte. Du skal køre på fortovet, og nedkørslen fra fortovet ned til vejen/gang overgangen. Du må IKKE køre direkte ned af fortovet uden en nedkørsel.

2.3.3 Kørsel på skråninger

Kørestolen har en vis evne til at klare stigninger. Den anbefalede klatreevne er $\geq 3^\circ$, **men må ikke overstige 10°** . Forsøg **aldrig** at køre op ad stejle bakker, som overskrider denne grænse.

2.3.4 Undgå menneskemængder og tæt trafik

Undgå at køre i tæt befolkede områder, i trafikstrømme eller på steder, hvor mange mennesker samles.

2.3.5 Sikker kørsel og kropsholdning

- Sørg for, at styresystemet er **fastmonteret og i korrekt position**.
- Joysticket skal stå **lodret** og være korrekt placeret.
- Sid **stabilt og fast** i sædet. Sørg for at spænde eventuelle seler eller støtteudstyr, hvis nødvendigt.
- **Læn dig altid tilbage mod ryglænet**, især hvis du oplever balanceproblemer eller føler dig ustabil.

2.3.6 Start forsigtigt og tilpas hastigheden

- Tænd for el-kørestolen ved at trykke på **tænd/sluk-knappen**.
- Tjek, om den **valgte hastighedsindstilling passer til din sikkerhed og komfort**. Hvis ikke, juster hastigheden.
- **Start altid i lav hastighed** og øg gradvist, når du føler dig tryk ved styringen.

2.3.7 Indikationer for brug

Denne el-kørestol er en **motoriseret enhed**, der er designet til at give mobilitet til personer med **behov for støtte i siddende position**. Den er velegnet til **handicappede personer eller ældre med mobilitetsbesvær**.

2.4 Elektromagnetisk interferens (EMI)

Elektromagnetisk interferens kommer fra ekstern elektromagnetisk bølgeenergi (som radioer, tv-transmissionsstationer, CB-radiobølger og garageportstartere, radiotelefoner osv.). Elektromagnetisk interferens kan påvirke el-kørestolens styresystem. Nogle forstyrrelser kan føre til bremsefejl, tænding automatisk eller styrefejl, kan også føre til permanente skader på kontrolsystemerne. Nedenstående kabler er angivet til EMC-reference.

Kabel	Maks. kabellængde, Afskærmet/uskærmet		Antal	Kabelklassificering
AC Power Line	1m	afskærmet	1 sæt	AC strøm
DC Power Line	0,95 m	afskærmet	1 sæt	DC strøm

Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Dette elektriske medicinske udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og tages i brug i henhold til EMC-oplysningerne i brugervejledningen; Udstyret overholder denne IEC 60601-1-2:2014-standard for både immunitet og emissioner. Ikke desto mindre skal særlige forholdsregler overholdes: Udstyret med ESSENTIAL PERFORMANCE/Following ESSENTIAL PERFORMANCE er beregnet til at blive brugt i et hjemmemiljø.

VÆSENTLIGE YDELSE:

El-kørestolen kan fungere normalt uden at bevæge sig ud af kontrol, og hastighedsændringen er ikke mere end $\pm 20\%$.

ADVARSEL: Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i forkert betjening. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr observeres for at verificere, at det fungerer normalt. Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem, der er specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan resultere i øget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet af dette udstyr og resultere i forkert drift.

ADVARSEL: Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive ydre enheder såsom antennekabler og eksterne antenner) bør ikke bruges tættere end 30 cm (12 tommer) fra nogen del af N6103, inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af dette udstyrs ydeevne."

ADVARSEL: Hvis brugsstedet er i nærheden af (f.eks. mindre end 1,5 km fra) AM-, FM- eller tv-udsendelsesantennener, før du bruger dette udstyr, skal det observeres at verificere, at det fungerer normalt for at sikre, at udstyret forbliver sikkert med hensyn til elektromagnetiske forstyrrelser i hele den forventede levetid. Når AC-indgangsspændingen afbrydes, vil udstyret standse, og hvis strømmen vil blive genopladet, vil det automatisk blive genopladet. nedbrydning kan accepteres, fordi det ikke vil føre til uacceptable risici, og det vil ikke resultere i tab af grundlæggende sikkerhed eller væsentlig ydeevne.

EMI-overholdelsestabel (tabel 1)

Tabel 1 - Emission

Fænomen	Overholdelse	Elektromagnetisk miljø
RF-emissioner	CISPR 11 Gruppe 1, Klasse B	Hjemmesundhedsmiljø
Harmonisk forvrængning	IEC 61000-3-2 Klasse A	Hjemmesundhedsmiljø
Spændingsudsving	IEC 61000-3-3 overensstemmelse	Hjemmesundhedsmiljø

EMS-overholdelsestabel (tabel 2-5)

Tabel 2 - Indkapslingsport

Fænomen	Grundlæggende EMC-standard	Immunitetstestniveauer
Elektrostatisk udladning	IEC 61000-4-2	±8kV kontakt, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV luft
Udstrålet RF EM-felt	IEC 61000-4-3	20V/m 26MHz-2,5GHz, 80% AM ved 1kHz, 10V/m 80MHz-2,7GHz
Nærhedsfelter fra RF trådløst kommunikationsudstyr	IEC 61000-4-3	Se tabel 3
Magnetiske felter med nominel effektfrekvens	IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz eller 60Hz

Tabel 3 - Nærhedsfelter fra RF trådløst kommunikationsudstyr

Testfrekvens (MHz)	Bånd (MHz)	Immunitetstestniveauer
385	380-390	Pulsmodulation 18Hz, 27V/m
450	430-470	FM, 5kHz afvigelse, 1kHz sinus, 28V/m
710	704-787	Pulsmodulation 217Hz, 9V/m
780	800-960	Pulsmodulation 18Hz, 28V/m
1720	1700-1990	Pulsmodulation 217Hz, 28V/m
1845	2400-2570	Pulsmodulation 217Hz, 28V/m
5240	5100-5800	Pulsmodulation 217Hz, 9V/m

Tabel 4 - Input AC Power Port

Fænomen	Grundlæggende EMC-standard	Immunitetstestniveauer
Elektriske hurtige transienter/udbrud	IEC 61000-4-4	±2kV, 100kHz gentagelsesfrekvens
Overspændinger (linje-til-linje)	IEC 61000-4-5	±0,5kV, ±1kV
Ledede forstyrrelser induceret af RF-felter	IEC 61000-4-6	3V, 0,15MHz-80MHz; 6V i ISM-bånd, 80 % AM ved 1kHz
Spændingsfald	IEC 61000-4-11	0 % UT, 0,5 cyklus; 40 % UT, 5 cyklusser; 70 % UT, 25 cyklusser
Spændingsafbrydelser	IEC 61000-4-11	0 % UT, 250/300 cyklusser UT=nominel indgangsspænding

Tabel 5 - Signal input/output porte

Fænomen	Grundlæggende EMC-standard	Immunitetstestniveauer
		Sundhedsmiljø
Elektrostatisk udladning	IEC 61000-4-2	±8kV kontakt, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV luft

ADVARSEL! Før du bruger dit produkt første gang, skal du sikre dig, at alle skruer og bolte er forsvarligt fastgjort.

Derudover er det obligatorisk at inspicere og spænde alle skruer og bolte på en månedlig basis for at sikre deres sikre fastgørelse. Manglende overholdelse af disse sikkerhedsretningslinjer kan resultere i alvorlig personskade eller endda død. Prioriter venligst din sikkerhed og sikkerheden for dem omkring dig ved at følge disse forholdsregler omhyggeligt.

ADVARSEL! Overhold venligst ADVARSLERNE nedenfor for at undgå skader eller kvæstelser som følge af forkert brug af din kørestol. Kørestolsbrugeren er ansvarlig for at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi er ikke ansvarlige for personskade og/eller produktskade, der skyldes forkert brug af kørestolen. Overhold alle lokale regler for fodgængertrafik. Det kan være svært for andre at se dig, når du sidder på din kørestol. Vent, indtil din sti er fri af trafik, og fortsæt derefter med ekstrem OBS. Brug af sikkerhedsanordninger såsom reflekser, reflekterende beklædningslys og sikkerhedssymboler er meget vigtig eller din sikkerhed under kørslen.

ADVARSEL! Prøv ALDRIG en ny manøvre på egen hånd, ud fra den angivne manual.

ADVARSEL! Brug ikke kørestolen til andet end dets oprindelige formål. Undgå enhver brug, såsom vægttræning, sport og atletik, slæbning, flytning eller bugsering af noget, der kan føre til sikkerhedsrisici og unødigt belastning af kørestolen.

ADVARSEL! Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ryger cigaretter, mens du sidder på din kørestol. Du skal overholde følgende sikkerhedsretningslinjer, hvis du beslutter dig for det: Hold askebægre i sikker afstand fra sædehynderne. Sørg altid for, at cigaretter er helt slukkede, før de bortskaffes.

ADVARSEL! Hold dig væk fra brændstof, såsom ilt, alkohol, når du kører kørestol, ellers vil det øge risikoen

ADVARSEL! Delene i denne kørestol er flammehæmmende dele, og delene bør ikke udskiftes efter for godtbefindende, ellers vil risikoen for brændbarhed øges.

ADVARSEL! Før du stiger af og på kørestolen, bør du sidde bagved så langt som muligt for at undgå skader forårsaget af væltning.

ADVARSEL! Undgå at holde i armlænet, hvilket vil forårsage væltning og skader.

ADVARSEL! Undgå at koncentrere din vægt om fodstøtten. Ellers vil det forårsage væltning og personskade.

ADVARSEL! Brug ikke kørestolen i manuel tilstand uden ledsagelse, hvilket kan forårsage personskade. **ADVARSEL!** Når du sidder i kørestolen, skal du ikke bevæge dig selv, da det kan forårsage personskade. Spørg din ledsager om hjælp, hvis det er nødvendigt.

ADVARSEL! Foretag ikke ændringer på kørestolen uden tilladelse. Tilføjelse af tilbehør kan ændre nogle af kørestolens specifikationer, såsom totalvægt, størrelse eller tyngdepunkt. Bemærk venligst, at nogle ændringer kan skade ting omkring dig

ADVARSEL! Ændre venligst ikke din sædespecifikation. Placer ikke puder eller puder på sædet, hvilket vil resultere i, at brugeren falder ud af kørestolen på grund af sædets ustabilitet.

ADVARSEL! Vær yderst forsigtig, når du bruger ilt i nærheden af elektriske kredsløb eller brændbare materialer. Kontakt venligst din iltleverandør for information om sikker brug af ilt.

Opmærksomhed! Ændr ikke controllerens indstillinger. Bed din tjenesteudbyder om at tjekke det, hvis du bemærker ændringer i din evne til at styre kørestolen.

ADVARSEL! Under driften kan kørestolen pludselig stoppe når som helst. Betjen ikke kørestolen, hvis den er unormal eller uregelmæssig.

ADVARSEL! For at forhindre, at kørestolen mister kontrollen og bevæger sig af sig selv, må du ikke placere kørestolen i manuel tilstand på et skråplan.

ADVARSEL! Hvis du forventer at sidde i en fast stilling i lang tid, skal du slukke for strømmen for at forhindre bevægelse af kørestolen

ADVARSEL! Undgå alt tilbehør, der kan forstyrre betjeningen af joysticket. Ellers vil det få kørestolen til at bevæge sig uventet.

ADVARSEL! Hold dig selv, tøj og andre genstande væk fra hjulet, mens kørestolen er i bevægelse. Træk ikke noget bagved kørestolen under kørslen.

Opmærksomhed! Tilslut ikke andre enheder til det elektroniske system eller tænd for andre enheder med kørestolens batteri.

Opmærksomhed! Når du frakobler ledningsnettet, bedes du holde terminalen i tilfælde af beskadigelse af den. Træk ikke direkte i ledningsnettet.

ADVARSEL! Hold alle opladerens stikterminaler rene og tørre, væk fra fugtige kilder for at forhindre beskadigelse af det elektriske system og personskaade.

Opmærksomhed! Kørestolens opbevaringstemperatur er -250-700. Langtidsopbevaring i omgivelser med lav eller høj temperatur vil skade dens funktion.

Opmærksomhed! Kontroller altid elektriske komponenter for korrosion. Kontroller alle bremsere for løse, slitage eller skader. Kontroller ledningsnet og klemmestolper for brud. Hvis det er nødvendigt, bedes du foretage udskiftningen.

Opmærksomhed! Sørg for sikkerheden for kørestole og batterier under transport. Transporter aldrig kørestole eller batterier med brændbare materialer.

Opmærksomhed! Tilslut ikke kablet direkte til batteriterminalen/klemmen til opladning

Opmærksomhed! Fjern ikke sikringen fra batteriledningen. Hvis sikringen er beskadiget, skal du kontakte din leverandør for udskiftning.

ADVARSEL! Betjen ikke kørestolen med dødt batteri. Du kan blive fanget. ADVARSEL! Sæt farten ned, når du drejer, lav ikke skarpe sving, hold tyngdepunktet stabilt, når du drejer. For at forhindre væltning, flyt ikke tyngdepunktet i den modsatte retning, når du drejer. ADVARSEL! Kør lige op ad skråningen, når du klatrer. Begge forhjul skal lande på samme tid. For at reducere muligheden for at vælte må du ikke lave en vinkel med skråningen; lad ikke hjulet på den ene side eller siden af kørestolen gå op ad skråningen først. Vær særlig forsigtig, når du bestiger nogen skråninger. ADVARSEL! Kør ikke på potentielt farlige veje eller skråninger, inklusive men ikke begrænset til veje dækket af sne, is, afklippet græs eller våde løv.

ADVARSEL! Kør venligst ned ad en skråning med minimumshastighed. Hvis nedstigningshastigheden er hurtigere end forventet, skal du slippe joysticket for at stoppe kørestolen og derefter trykke let på håndtaget for at kontrollere nedstigningshastigheden.

ADVARSEL! Placer ikke kørestolen på køretøjets forsæde under transport. Ellers kan det flytte sig og forstyrre føreren.

Opmærksomhed! Kontakt venligst din serviceudbyder, hvis noget tilbehør til tætningsenheden løsner sig; Udskift de slidte eller beskadigede dele med det samme.

ADVARSEL! Den anbefalede maksimale klatrevinkel (se parametertabel) blev testet i et kontrolleret miljø. Din kørestols klatreevne påvirkes af faktorer som din vægt, din kørestols hastighed og den vinkel, hvormed du nærmer dig skråningen.

ADVARSEL! Kør venligst ned ad en skråning med minimumshastighed. Hvis nedstigningshastigheden er hurtigere end forventet, skal du slippe joysticket for at stoppe kørestolen og derefter trykke let på håndtaget for at kontrollere nedstigningshastigheden.

ADVARSEL! Når du sidder i kørestol, undgå enhver stilling eller bevægelse, der kan ændre dit tyngdepunkt. Dette kan få kørestolen til at vippe. **ADVARSEL!** Læg ikke hele vægten på den ene side af kørestolens armlæn, sådan brug kan få kørestolen til at vippe.

ADVARSEL! Læg ikke hænderne over sædet eller vip kroppen. Dette kan beskadige ryglænet og få dig til at falde ned.

ADVARSEL! Selvom din kørestol kan krydse høje forhindringer, anbefaler vi, at du ikke forsøger at krydse den specificerede højde. Sådanne handlinger kan få kørestolen til at være ustabil, selv vælte og forårsage alvorlig personskade. Hvis du har nogen bekymringer om sikker passage af forhindringer, så spørg venligst om hjælp. Vær opmærksom på dine betjeningsevner og personlige begrænsninger. Det kan være nødvendigt at fjerne eller dække karmene og installere ramper ved ud- og indgange.

ADVARSEL! Forsøg ikke at klatre over forhindringer på.
ADVARSEL! Stol ikke på et hjul for at komme over forhindringer.

ADVARSEL! Betjen aldrig kørestolen i nærheden af jernbanespor eller krydsninger.

ADVARSEL! Kør ikke kørestolen langs kanten af en å, sø eller hav. Kør venligst ikke kørestolen hen over vandet.

ADVARSEL! Udsæt ikke kørestolen for åben ild.

ADVARSEL! Opbevar din kørestol i et tørt og rent miljø. Tag ikke kørestolen med i brusebad, bad eller sauna. Regn, sne, salt, tåge/sprøjt og frosne/glatte overflader kan få kørestolsskruer og visse armaturer til at ruste i utide.

ADVARSEL! Undgå langvarig udsættelse for alt for varme og kolde miljøer; det kan beskadige de polstrede og ikke-polstrede dele af kørestolen samt batteri- og batterikomponenterne.

OPMÆRKSOMHED! Træk ikke kørestolen. Slæb kan overskride dens egen hastighedstærskel, hvilket forårsager skade på vigtige dele af kørestolen.

OPMÆRKSOMHED! Vær yderst forsigtig, når du flytter en ledig kørestol op og ned ad trappen. Kørestolen skal foldes sammen, hvilket kræver deltagelse af fysisk dygtige mennesker.

ADVARSEL! Kryds ikke trapper eller rulletrapper med kørestolen.

ADVARSEL! Sid ikke på en kørestol, mens den er i transportkøretøjer.

ADVARSEL! For sikker håndtering: Hold altid strømmen slukket, før du flytter. Undladelse af at gøre det kan resultere i berøring af joysticket og få kørestolen til at bevæge sig uventet. Sørg for, at bremserne er låst, så kørestolen ikke bevæger sig under håndtering. Denne kørestol kan køres ind i elevatoren, mens du skal slukke for strømmen og sidde stabilt for at sikre, at kørestolen ikke bevæger sig efter indstigning i elevatoren.

ADVARSEL! Kontakt venligst dit sundhedspersonale rutinemæssigt for at sikre, at der ikke er nogen helbredsæssige eller fysiske forhold, der kan begrænse eller forringe din evne til sikkert at betjene din kørestol. Kontakt din læge, hvis du tager receptpligtig eller håndkøbsmedicin, eller hvis du har fysiske begrænsninger. Nogle medikamenter og fysiske begrænsninger kan svække din evne til at betjene din kørestol sikkert.

ADVARSEL! Betjen ikke din kørestol, mens du er påvirket af alkohol, da det kan forringe din evne til sikkert at betjene din kørestol. **ADVARSEL!** Hver kørestol er forskellig. Tag dig tid til at lære det, før du kører. **ADVARSEL!** VÆR bevidst om, at det vil tage tid og øvelse at blive en dygtig og sikker kørestolsfører.

ADVARSEL! For at sikre din sikkerhed, bedes du læse og forstå denne manual. Du skal være på vagt, når du kører en hvilken som helst kørestol for at sikre sikkerheden.

ADVARSEL! Radiobølgekilder, såsom radiostationer, tv-stationer, amatørtransmissioner, tovejsradioer og mobiltelefoner kan påvirke kørestolskontrol. Følgende **ADVARSLER** bør reducere muligheden for alvorlig personskade på grund af utilsigtet opbremsning eller bevægelse af el-kørestolen:

1. Tænd ikke bærbare personlige kommunikationsenheder, såsom borgerbånd (CB) radioer og mobiltelefoner, når el-kørestolen er tændt:
2. Vær opmærksom på sendere i nærheden, såsom radio- eller tv-stationer, og forsøg at undgå at nærme dig dem.
3. I tilfælde af uventet bevægelse eller frigivelse af bremsen, skal el-kørestolen slukkes så hurtigt som muligt under sikre forhold;
4. Bemærk venligst, at tilføjelse af tilbehør eller dele eller ændring af el-kørestole kan gøre den mere modtagelig over for interferens fra radiobølgekilder (bemærk: der er ingen nem måde at vurdere indflydelsen af ovenstående modifikationer på kørestolens samlede immunitet mod radiobølgekilder); og rapporter til el-kørestolsproducenten om alle ulykker med uventet bevægelse eller udløsning af bremsen, og vær opmærksom på nærliggende radiokilder og anden vigtig information.


Opmærksomhed! Returner venligst de kasserede batterier, controllere, Xmotorer osv. til leverandøren eller producenten for bortskaffelse for at undgå miljøforurening.

ADVARSEL! At overfladetemperaturer kan stige, når de udsættes for eksterne varmekilder. Kan forårsage dine forbrændinger.


3.YDELSE OG STRUKTUR

3.1 Produktstruktur

El-kørestolen er hovedsageligt sammensat af forhjul, drivhjul, stel, controller, motor og drivenheder, armlæn, skubbehåndtag, ryglæn, sædehynde, fodstøtte, batteriboks og oplader. Strukturdiagrammet er som nedenfor.

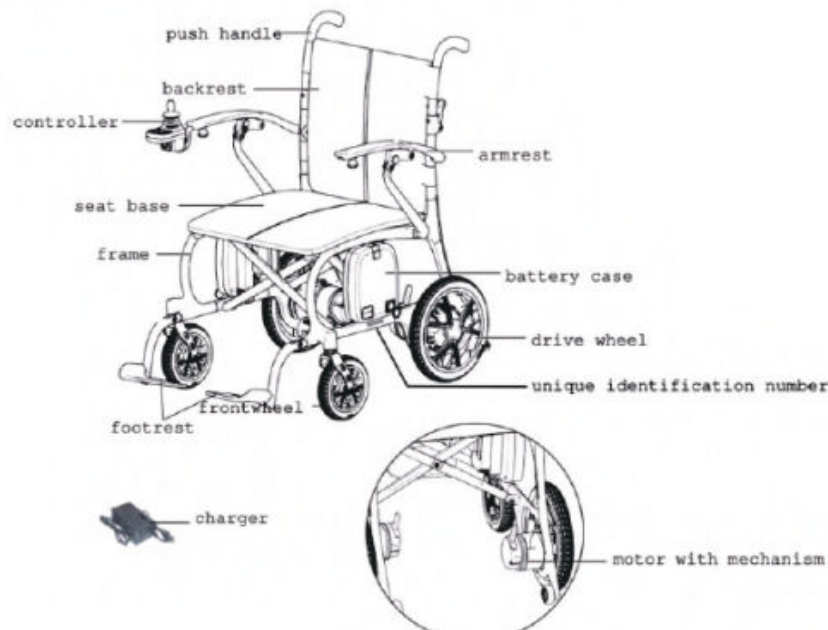

3.2 Elektrisk diagram af el-kørestol

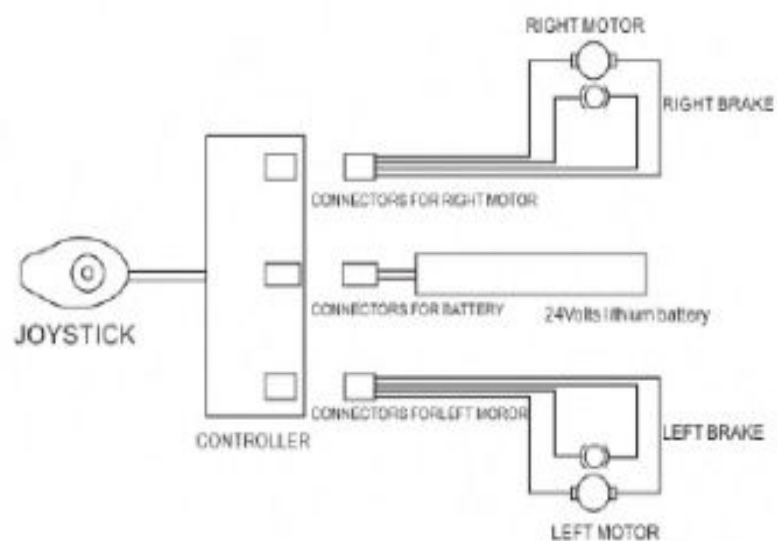

4. **TEKNISK FUNKTION**

Den vigtigste præstationsparameter for el-kørestol

Parameter	Værdi
Overordnede dimensioner (LWH)	910 mm x 610 mm x 895 mm
Foldede dimensioner (LWH)	730 mm x 310 mm x 710 mm
Samlet masse	13 kg
Masse af den tungeste del	1,3 kg
Pivotbredde	1120 mm
Vende bredde	1500 mm
Drejediometer	1800 mm
Frihøjde	32 mm
Påkrævet bredde af vinklet korridor	1000 mm
Påkrævet døråbningsdybde	1600 mm
Nødvendig korridorbredde til sideåbning	900 mm
Statisk stabilitet	9°
Køreafstand	≥10 km
Dynamisk stabilitet op ad bakke	3°
Klatreevne	10°
Maksimal klatregrad	10°
Max over forhindringshøjden	≥25 mm
Maksimal hastighed fremad	6 km/t
Minimum bremselængde fra max hastighed	≤100 mm
Sædeplanets vinkel	4°
Effektiv sædedybde	415 mm
Sædebredde	460 mm
Effektiv sædebredde	510 mm
Sædeoverfladehøjde i forkant	440 mm
Ryglænets vinkel	5°

Specifikation	Værdi
Ryglænets højde	445 mm
Rygstøttehøjde/Ryglænsenhøjde	417 mm
Afstand fra fodstøtte til sæde	390 mm
Afstand fra fodstøtte til overflade	75 mm
Fodstøttelængde	115 mm
Fodstøtte til ben vinkel	97°
Ben til sæde overflade vinkel	114°
Armlæns højde	240 mm
Armlænskonstruktion foran	360 mm
Armlæns længde	390 mm
Armlæns bredde	50 mm
Armlæns vinkel	2,5°
Hørbar støj	≤65 dB(A-vægtet)
Kræfter, der er nødvendige for at betjene styreenheder	Trykknop: 2N, Vippeknop: ≤5N
Motor model	ZW9012L3A-S 24V/150W*2
Lithium-batterispecifikation	24V10Ah
Maksimal udgangsstrøm for controller	35A
Maksimal udgangsstrøm for oplader	2A
Diameter på bevægelige hjul/Hjuldiameter	Oppustningsfri, udvendig størrelse på 165 mm
Diameter på faste hjul/Drifthjulsdiameter	Oppustningsfri, udvendig størrelse på 270 mm
Lineær tolerance	±50 mm
Vinkeltolerance	±2°
Massetolerance	±2 kg

Note:

- 1)Vægtkapaciteten testes med en dummy eller personale af samme vægt.
- 2) Maksimal potentiel rækkevidde testes på flad vej med gennemsnitshastighed; det vil variere på grund af køreoverfladen, driftsvaner osv.

Opmærksomhed! Kørselængden vil blive reduceret, hvis kørestolen bruges hyppigt på skrånninger, ujævnt underlag eller til at forcere kantsten mv.

5.Samling, foldning og justering

5.1 Samling

5.1.1 Tag kørestolen ud af pakkeboksen og læg den på jorden. Skub stolestellet fra hinanden til venstre og højre, og pres to rør på begge sider af sædebunden ned i rillerne på begge sider af stolerammen. (Fig.1)

5.1.2 Løft ryglænet (fig.2), og fjederstiften skal klikkes ind i hullet på ryglænsrøret. (Fig.3) Bind derefter ryglænets stofbetræk til rammen og sæt velcroen fast, og slip fodstøtterne. (Fig.4)

5.1.4 Sæt controlleren på armlænet. Og træk derefter strammenøglen på controlleren ned for at fastgøre controlleren. (Fig.5)

5.1.5 Før kørestolen tændes, skal batteriet fastgøres på stellet, da det sættes det ind i skinnen, og derefter trykkes ned til bunden, indtil det har en "klik"-lyd. (Fig. 6)




5.2 Foldning

Brug venligst nedenstående metoder, hvis du transporterer eller opbevarer el-kørestolen: 1. Stil kørestolen på fladt underlag, og sluk for strømforsyningen.

2. Drej fodstøtten opad. (Fig.7)

3. Stellet kan foldes sammen ved at trække sædegrebet op fra begge sider samt trække de to håndtagsstroppe op under sædehynden. (Fig.8)

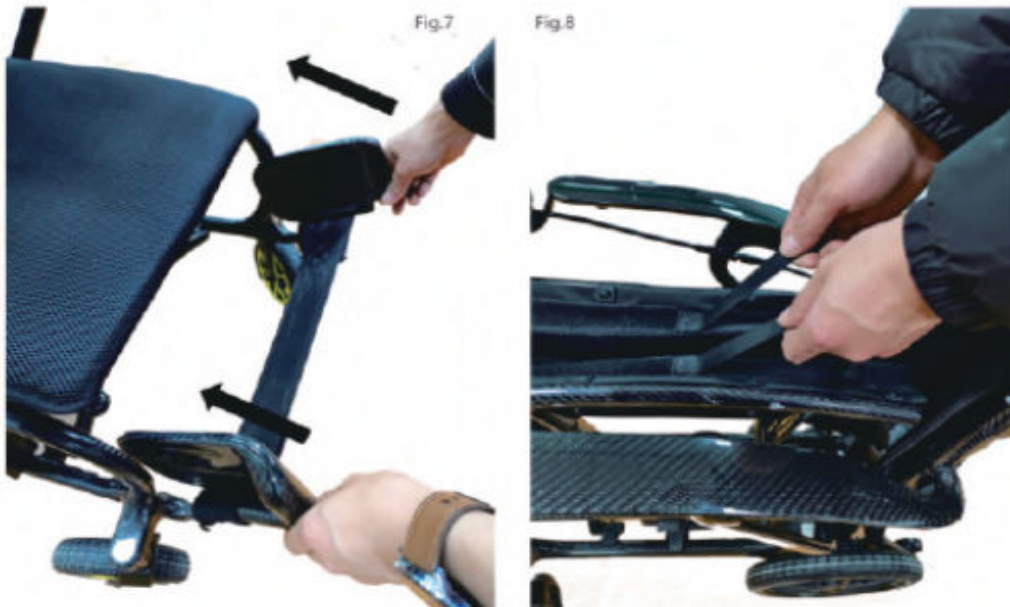


5.3 Justering

5.3.1 Hver motor har et bremsegreb. Når håndtaget trykkes på sted A, vil kørestolen være i elektrisk tilstand, som kun vil blive betjent ved hjælp af kraft. Når håndtaget på position B, vil kørestolen være i manuel tilstand, som kun vil blive skubbet med hånden. (Fig. 9)

5.3.2 Tryk på strømafbryderen på joysticket, og batteriindikatoren lyser.

5.3.3 Drej joysticket fremad til enden, observer rotationen af kørestolshjulene, og drej derefter den anden retning for at observere, om der er rotation for hjulene.

5.3.4 Slip joystick-håndtaget, det vil komme tilbage til midterpositionen, hvorefter du observerer, at hjulene skal stoppes.

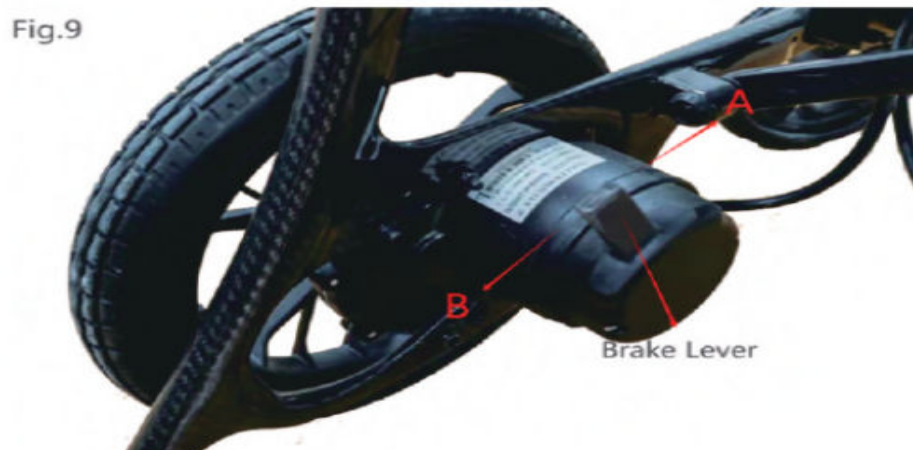

5.3.5 Armlænet kan vippes op, bedre til at være på/fra stolen. (Fig. 10)



5.3.6 Placeringen af punkter, hvor komponentdelene kan gribes for sikker flytning og håndtering og/eller en metode til håndtering under demontering, montering eller bærende (fig. 11);



6. BRUG OG BETJENING

6.1 Brug

6.1.1 Alle de elektriske komponenter til at styre kørestolen er integreret i joysticket, inklusive ON/OFF-kontakt; hastighed lys; batterimåler; hastighed ned-knap; hastighed op knap; joystick. Du kan implementere alle funktionerne i denne kørestol ved at bruge ovenstående knapper. (Fig. 12)



Fig.12

6.1.2 ON/OFF-knap (tænd/sluk-knap)

Denne knap styrer strømforsyningen til kørestolens styresystem.

- **Tænd kørestolen:** Tryk på **ON/OFF-knappen**, hvorefter strømindikatoren, hastighedslyset og batterimåleren tænder.
- **Sluk kørestolen:** Tryk på **ON/OFF-knappen** igen for at slukke strømmen. Hastighedslyset og batterimåleren vil også slukke.

6.1.3 Hastighed ned-knap

- Når kørestolen er tændt, viser hastighedsindikatoren den aktuelle **maksimale kørehastighed**.
- Ved at trykke på hastigheds-ned-knappen reduceres hastigheden én bjælke ad gangen.
- Jo færre bjælker, desto lavere er den maksimale hastighed.

6.1.4 Hastighed op-knap

- Når kørestolen er tændt, viser hastighedsindikatoren den **laveste kørehastighed**.
- Ved at trykke på hastigheds-op-knappen øges hastigheden én bjælke ad gangen.
- Jo flere bjælker, desto højere er den maksimale hastighed.

(Brugeren kan justere hastighedsniveauet efter behov.)

6.1.5 Batterimåler

Batterimåleren viser, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet:

- **Alle søjler tændt** → Batteriet er fuldt opladet.
- **3-4 søjler tændt** → Strømmen er stadig tilstrækkelig til brug.
- **Mindre end 2 søjler** → Batteriet er lavt og bør oplades snarest.

Bemærk: Hvis kørestolen bruges på skråninger, ujævnt terræn eller til at klatre op ad bakker, kan strømindikatorens visning falde hurtigt, da batteriet belastes mere.

6.1.6 Joystick

Joysticket bruges til at **styre kørestolens bevægelse**, herunder:

- Fremad
- Baglæns
- Drejning til venstre eller højre
- Justering af hastighed

Jo længere du skubber joysticket væk fra midterpositionen, desto hurtigere bevæger kørestolen sig.

- Når du slipper joysticket, **vender det automatisk tilbage til midten**, og **bremsesystemet aktiveres automatisk**, hvilket bringer kørestolen til standsning.

6.1.7 Slå baglæns-alarmlyd fra eller til

- **Sluk baglæns-alarm:** Tryk på **hastighed ned-knappen** og **hornknappen** samtidig i **3 sekunder**.
- **Tænd baglæns-alarm:** Tryk på **hastighed op-knappen** og **hornknappen** samtidig i **3 sekunder**.

6.1.8 Opladerstik

- **Opladerstikket er udelukkende beregnet til denne kørestol.**
- **Brug ikke stikkontakten til at forsyne andre elektroniske enheder** – dette kan beskadige kørestolens styresystem eller forringe dens **elektromagnetiske kompatibilitet (EMC)**.

ADVARSEL! Undgå alt tilbehør, der kan forstyrre joystickets betjening. Ellers kan kørestolen bevæge sig ved et uheld.

ADVARSEL! Hvis din kørestol bevæger sig ved et uheld, skal du straks slippe joysticket, og stolen stopper automatisk.

FORSIGTIGHED! Hvis du tilslutter andre enheder end den medfølgende batterioplader til stikkontakten, hvilket forårsager skade på kontrolsystemet, er garantien ugyldig.

6.2.1 Oplad dit nye batteri fuldt ud, inden det tages i brug. Dette bringer batteriet op på omkring 90 % af dets højeste ydeevne. Giv batteriet endnu en fuld opladning på 4-6 timer og betjen din kørestol igen; batterierne vil nu yde mere end 90 % af deres



potentiale. Efter fire eller fem opladningscyklusser vil batterierne nå 100 % opladning og holde i en længere periode. Udskift venligst et nyt batteri, når batteriet svigter, og det gamle batteri skal returneres til leverandøren på grund af miljøforurening.

Batteriet er garanteret i 2 år, som dækker produktfejl, men ikke slid som følge af brug af produktet

FORSIGTIGHED! Brug ikke din kørestol, når temperaturen er under -25°C eller over 50°C.

6.2.2 Opladning af batterier


Batteriopladeren er en vigtig del af kørestolen. Off-board oplader, der er knyttet til dette produkt, kan oplade sine batterier hurtigt, nemt for at gøre din kørestol den bedste. Batteriopladeren skal være i overensstemmelse med nedenstående specifikation:

Oplader	Model: QL-09005-B2402000F/60HZ/24V2A
Det nominelle indgangsspændingsområde	AC 100-240V
Den nominelle DC-udgangsstrøm	2000mA
Den nominelle DC-udgangsspænding	24V
Driftstemperaturområdet	0-35°C
De typer batterier, der kan oplades	Lithium batteri

Tildeling af opladningsstikben.(Fig.13)

6.2.3 Fjernelse af batteri

Tryk og hold knappen nede med hånden, og træk samtidig batteriboksen op for at fjerne den. (Fig. 14)

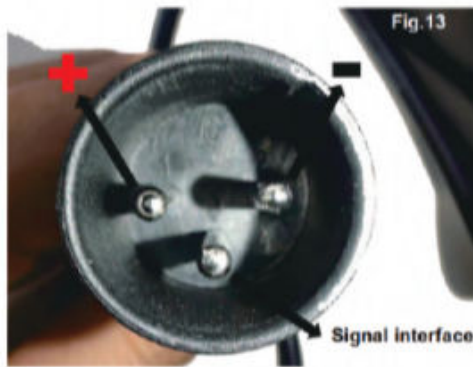

ADVARSEL!Batteripakken skal være korrekt installeret i glideskinnen, ellers bliver kørestolen ubrugelig.

6.2.4 Oplad batteriet med oplader. Metode 1: Tilslut opladeren til opladningsporten på controlleren. Metode 2: Fjern batteriet fra kørestolen og oplad det direkte. (Fig.15)



ADVARSEL!Oplad venligst batteriet ved omgivelsernes temperatur. 0-35°C, Hold dig væk fra brændbare genstande, brændbare gasser

6.2.5 Sikkerhedssæle

For din sikkerhed undervejs skal du spænde sikkerhedssælen, hver gang du sidder i kørestolen.

Klik på bæltespændet for at høre en "klik"-lyd (fig.16)



ADVARSEL! Betjen ikke kørestolen under opladning.

OPMÆRKSOMHED! Batteriet, som kørestolen bærer, opfylder IEC62133-standarden. Udskift venligst med batteri af samme type, kemiske stoffer og kapacitet. Vælg venligst batteritype og kapacitet pr. specifikation i manualen. Brug venligst det udskiftningsbatteri, der leveres direkte af den eller de autoriserede leverandør(er) for at sikre ydeevne og funktion.

OPMÆRKSOMHED! Beskyt batteriet mod at fryse: Lad være med at oplade det frosne batteri, da batteriet ellers kan blive beskadiget.

6.3 Udskiftning af batteri

Hvis batteriet skal udskiftes, skal du frigøre batteripakkens spænde under sædet og derefter tage det ud. Batteriet skal være i overensstemmelse med nedenstående specifikation:

TYPE	LITHIUM BATTERI
DIMENSIONSSPÆNDING	190*150*60 mm
SPÆNDING	24V

6.4 Betjening

6.4.1 Forberedelse før brug

Tænd ikke for strømafbryderen, før du sætter dig på kørestolen, og sluk for strømafbryderen, før du stiger af kørestolen. Vær opmærksom på om bremsen virker eller ej.

Klap først fodstøtten ud og hold derefter armlænet for at sidde på kørestolen; Stig ikke af kørestolen ved at træde på fodstøtten. Ellers kan kørestolen vende, hvilket er farligt.

6.4.2 Øv før betjening.

Find et rummeligt sted som kvadratisk, og få en assistent til at hjælpe dig med at øve dig, indtil du har nok selvtillid til at betjene det.


Sørg for at slukke for strømmen, når du stiger af og på kørestolen, og indstil en hastighed, du har brug for, via knappen til hastighedsjustering.

Vi anbefaler, at du indstiller den laveste hastighed, indtil du kan betjene den elektriske kørestol dygtigt.

Øv dig i at stoppe, bevæge dig frem og tilbage. Tryk på joysticket, kørestolen bevæger sig hvorhen du vil.

For det første skal du sikre dig, at det er den laveste hastighed, når du øver dig fremad. Efter dygtig, kan du øve "S" formet tur. Når du er bekendt med "S"-formet drejning, for at øve baglæns drift, og vær opmærksom på hastighedskontrolindstillingen. Og hastigheden baglæns skal være lavere end hastigheden fremad.

(Som vist nedenfor)

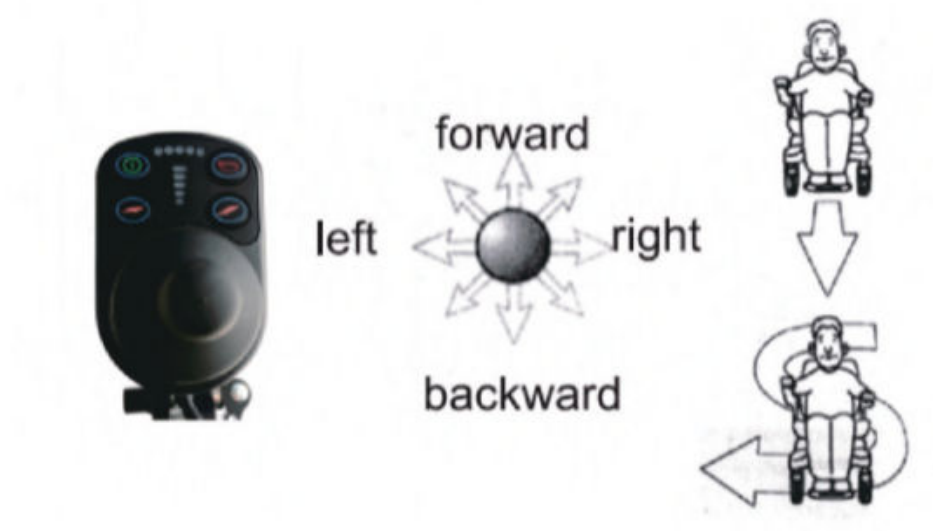

ADVARSEL!Tryk ikke hårdt på joysticket med hånden, når du stiger på/af kørestolen for at undgå ulykker (fig.17)



Fig.17

ADVARSEL! Brug ikke din kørestol, medmindre du får hjælp fra din assistent, når kørestolen er i manuel tilstand. Ellers kan det resultere i personskade. Sæt ikke din kørestol i manuel tilstand alene, mens du sidder i kørestolen. Ellers kan det resultere i personskade. I dette tilfælde skal du bede din assistent om at hjælpe dig. Indstil ikke din kørestol i manuel tilstand, når den er på en skråning. Ellers kan kørestolen være ude af kontrol og rulle ned af sig selv og resultere i personskade.

7.FEJLANALYSE OG FEJLFINDING

For nemheds skyld er denne kørestol udstyret med et automatisk fejladvarelsesystem. Hvis kørestolen ikke fungerer som den skal, kan du finde fejlen i henhold til nedenstående tabel. Hvis fejlen fortsætter efter kontrol, bedes du kontakte din servicemedarbejder.

Bip kode	Fejl	Løsning
Bip 2+1	Kommunikationsfejl	Kontroller forbindelsen inde i joysticket
Bip 2+2	Højre motorfejl	Kontroller højre motor- eller ledningsforbindelse
Bip 2+3	Højre bremsefejl eller kabelforbindelse dårlig	Kontroller, om bremsegrebet er på plads, og om bremsen er beskadiget
Bip 2+4	Venstre motorfejl	Kontroller venstre motor eller ledningsforbindelse
Bip 2+5	Venstre bremsefejl eller kabelforbindelse dårlig	Kontroller, om bremsegrebet er på plads, og om bremsen er beskadiget
Bip 2+6	Overstrøm	Kontroller, om motoren er låst eller kortslutter, eller om joysticket er beskadiget
Bip 2+7	Joystick håndtag fejl	Kontroller, om joysticket fungerer normalt, eller om den indvendige forbindelse er løs
Bip 2+8	Joystick fejl	Kontakt leverandøren for reparation
Bip 2+9	Batterifejl	Oplad batteriet, hvis det stadig ikke virker, udskift et nyt batteri med samme specifikation

OPMÆRKSOMHED! For at sikre kørestolens kvalitet under vedligeholdelsen, hvis nogen forbrugsdele såsom batteri, hjul, joystick, motor/aktuator og oplader skal udskiftes, bedes du kontakte dette firma eller forhandler, udskifte de originale dele af samme model og specifikation. Kontakt denne virksomhed eller forhandler, udskift de originale dele af samme model og specifikation.

8. SIKKERHEDSBESKYTTELSESENHED OG HÅNDTERING AF ULYKKER

8.1 Overbelastningsbeskyttelse: Se instruktionsmanual 6.1.7

8.2 Sikkerhedssele: Se instruktionsmanual 6.1.9

8.3 Slip venligst joysticket, når der er en kørestolsfejl, kørestolen vil blive stoppet.

9. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

9.1 Vedligeholdelse

Ligesom andre motoriserede kørestole kræver din el-kørestol også rutinemæssig vedligeholdelse. Nogle kontroller kan du selv udføre, andre kan du bede om assistance fra din serviceagent. Forebyggende vedligeholdelse er meget vigtig. Hvis du følger vedligeholdelsen og kontrollerne i dette afsnit, vil din kørestol give dig mange års problemfri drift. For spørgsmål vedrørende vedligeholdelse eller betjening af kørestolen, kontakt venligst din forhandler eller vores eftersalgsserviceafdeling.

9.1.1 Fugtighed

Din kørestol er, ligesom det meste af elektrisk og mekanisk udstyr, modtagelig for ydre forhold. Under alle omstændigheder bør kørestolen undgås fugtigt miljø. Direkte eller længerevarende udsættelse for vand eller fugt kan forårsage, at kørestolen ikke fungerer elektronisk og mekanisk. Vand kan få elektriske komponenter til at korrodere.

9.1.2 Temperatur

- Nogle dele af din kørestol er følsomme over for temperatur.

I ekstremt kolde temperaturer kan batteriet være frosset. Særlige temperaturer kan få en masse faktorer til at fryse, såsom opladertype, brug, batterikomponenter;

- Temperaturer over 55° kan medføre, at din kørestols hastighed reduceres.

9.1.3 Regelmæssig vejledning

Undgå at ramme controlleren, især joysticket.

- Undgå langvarig udsættelse af din kørestol for ekstreme forhold, såsom varme, kolde eller fugtige omgivelser.

Hold controlleren ren.

- Kontroller alle elektriske forbindelser, inklusive kabel og stik på opladeren, og sørg for, at de alle er tætte og sikre.

Hvis kun den røde LED på batterimåleren lyser, er batterierne næsten ved at løbe tør. Du bør genoplade batterierne så hurtigt som muligt. Vi anbefaler at oplade batteriet i 8-12 timer.

● Rammens overflade er blevet sprøjtet med en klar tætningsbelægning. Du kan påføre et let lag bilvoks for at få overfladen til at holde en høj glans.

- Kontroller alle kabelforbindelser. Sørg for, at de er godt forbundet og ikke korroderede. Batteriet skal placeres i batteriområdet med god tilslutning.
- Alle hjullejer er smurt og forseglet. Behøver ikke at smøre dem.
- Tjek, om der er løst fænomen for hjulnav, drivenhed og selve stolen. Hvis det er løst, skrues det fast i tide.

9.1.4 Vedligeholdelse efter brug

Sluk for strømmen.

- Børn og bevidstløse personer forhindres i at bruge kørestolen.
- Opbevar kørestolen i normal temperatur for at forhindre deformation, så den bevarer sin ydeevne i længere tid.

Rengør kørestolen med en klar og blød klud og tør den. Brug aldrig kemikalier til at rengøre den. (for at forhindre deformation og misfarvning).

● Fjern stofovertrækket på sædestøtten, der skal vaskes, hvis det er snavset, og tør det derefter til brug.

9.1.5 Daglige kontroller

For altid at holde kørestolen i god stand, bør du kontrollere den før hver brug og holde ugentlig, månedlig, halvårlig kontrol. Se nedenstående tabel for inspektionspunkterne.

Inspektionsartikler	Til enhver tid	Ugentlig	Månedlig	Halvårligt
Hver del				○
Drejning, kørsel, indstilling, nedtagning mv		○		
Bremse	○			
Forbindelseslinjer		○		
Batteritilstand	○			
Dæk tilstand			○	
Motor				○
Enheder		○		
Renhed	○			

9.1.6 Rengøring

Rengøringsmåde som nedenfor:

- Vask aldrig din kørestol med vand, og udsæt aldrig den direkte for vand.
- Kørestolsstellets overflade er belagt med en beskyttende belægning. Derfor er det meget nemt at tørre det af med en fugtig klud. Brug aldrig kemikalier til at rengøre kørestol, da de kan forårsage, at sidstnævnte glider eller sprukker. Du kan bruge en fugtig klud og neutralt sæbevand til at rengøre dem og derefter tørre dem grundigt.

9.2 Reparation

9.2.1 Brugere kan reparere eller udskifte nogle reservedele såsom skubbehåndtag, skubbehåndtagsdæksel, som kan vedligeholdes selv eller udskiftes i henhold til instruktionerne fra forhandlerens eftersalgsservicepersonale.

9.2.2 Inden for garantien vil forhandlerne vedligeholde eller udskifte de defekte reservedele, såsom motor, batteri, lader, controller, leje, akselbøsning osv. på grund af materiale- eller fabrikationsfejl.

9.2.3 Reservedelene som motor, styreenhed osv., hvad der bekræftes af salgspersonale eller vores selskab eller vores forhandlere, der skal demonteres, kan sendes til vores selskab eller forhandlerne til vedligeholdelse.

efter-

9.2.4 Kontakt venligst din forhandler eller vores firmas eftersalgsservice for spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af el-kørestole.

OPMÆRKSOMHED! For at sikre kørestolens kvalitet under vedligeholdelsen, hvis nogen forbrugsdele såsom batteri, hjul, joystick, motor/aktuator og oplader skal udskiftes, bedes du kontakte dette firma eller forhandler og udskifte de originale dele af samme model og specifikation. Reparationen skal udføres i vores virksomheds eller forhandlerens professionelle vedligeholdelsesrum.

TRANSPORT OG OPBEVARING

10.1 Transport

Du kan læsse og transportere kørestolen i henhold til forsendelsesmærkerne og grafikken på kartonerne. For detaljer, se vedhæftet fil.

10.2 Opbevaring

Din kørestol skal opbevares i et rent indendørs miljø med relativ luftfugtighed <90%, temperatur mellem -25-70°, god ventilation og fri for ætsende gasser. Fjern batteriet fra kørestolen før opbevaring. Ellers kan rammen ruste, og elektronikken kan blive beskadiget.

11. GENEREL VEJLEDNING

11.1 Undgå at banke eller ramme kontrolenhederne;

11.2 Undgå langvarig udsættelse af din kørestol for ekstreme forhold, såsom varme, kolde eller fugtige omgivelser; holde controlleren ren.



- 11.3 Kontroller alle forbindelser, og sørg for, at de alle er tætte og sikre.
- 11.4 Kontroller alle kabelforbindelser, inklusive kabelforbindelsen til opladeren. Sørg for, at de sidder godt fast og ikke er korroderede. Batteripakken skal være korrekt installeret i glideskinnen.
- 11.5 Efter hver brug skal strømafbryderen slukkes i tide for at reducere unødvendigt batteriforbrug.
- 11.6 Kørestolen har strømbesparende funktion. Hvis der ikke er nogen betjening af kørestolen inden for 20 minutter, vil controlleren automatisk afbryde strømmen. Hvis det er nødvendigt at fortsætte med at betjene denne kørestol, skal du tænde den igen.
- 11.7 Alle hjullejer er smurt og forseglet. Ingen grund til at smøre dem.

12. Åbning og kontrol

Åbn pakkeboksen, og du kan tjekke, om der er noget, der er savnet eller beskadiget. Pakkeliste

Ingen.	Navn	Mængde	Bemærkning
1	El-kørestol	1 stk	Featherlite
2	Oplader	1 stk	Model: QI-09005-B240200F160HZ 24V2A
3	Lithium batteri	1 stk	24V10Ah
4	Instruktionsmanual	1 stk	
5	Controller	1 stk	

Tabel 2: Etiketter og emballagelogodesign

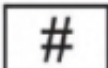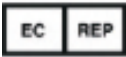Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Medicinsk udstyr		Sidste anvendelsesdato
	Opbevares tørt		Holdes væk fra sollys
	Se brugsanvisningen - anbefales. Manglende læsning af brugsanvisningen kan udgøre en fare		BF-type applikationsdel
	Temperaturbegrænsning		Fugt begrænsning
	Må ikke bruges, når emballagen er beskadiget		WEEE-mærke - findes på individuelle dele af det elektriske system (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
	Se brugsanvisningen		Unique Device Identification (UDI)
	Fremstillingsland		Modelnummer
	Importør		Distributør
IPX4	Vandtæt vurdering		Ingen tryk
	Advarsel mod klemme		Brug ikke denne del til at løfte hele køretøjet!
	Ikke beregnet til at blive brugt som sæde i et motorkøretøj		Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab

SIZE: 75*30mm

Electric Wheelchair



MD

MODEL: BC-EC8003-Z



Manufacturer Name:

Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.

Address: Room 903, Diqu Building, Water Street,
Southern Business District, Ningbo, Zhejiang, CN

SRN: NL-AR-000000247



Importer Name: Danmedica ApS

Address: Guldborgvej 21, 3.th, 2000, Denmark

VAT number: DK44866188



EU Representative: SUNGO Europe B.V.

Address: Olympisch stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands



2024-09



2034-09

Feature: Max Weight capacity 140kgs

Input: AC100-240V 50-60Hz

HELIUM